



## Liv Des Special +50

### Overflatedesinfeksjon

#### Overflatedesinfeksjon med tensid for å gi en rengjørende effekt, samt korrosjonsbeskyttelse for å unngå rust.

Den brukes i konsentrert form for effektivt å forebygge og forhindre spredning av mikrobiologiske infeksjoner (bakterier, sopp, virus) via overflater. Tilsetning av overflateaktivt middel øker alkoholens kontakt med overflaten.

Inneholder isopropanol (ca. 45%) - og etanol (ca. 10%). Svært godt egnet for dental- og medisinsk behandling, veterinærklinikker, laboratoriedrift eller lignende områder. Brukes hovedsakelig der spredning av mikrobiologisk infeksjon skal forhindres.

#### Bruksanvisning

Spray en rikelig mengde desinfeksjon på overflaten. Bearbeid overflaten med en ren tørreklut eller lofritt papir. Det er viktig at overflaten er fuktig under rengjøringen. Bruk hansker for å unngå uttørring av huden.

#### Dosering

Overflater: Rikelig produkt slik at hele overflaten dekkes og holdes fuktig gjennom eksponeringstiden.

#### Produktet oppfyller den europeiske standarden for desinfeksjonsmidler.

- Baktericid EN13727                    5 min
- Baktericid EN 13697                   2 min
- Gjærdrepene EN 13624                5 min
- Gjærdrepene EN 13697                2 min

*Bruk biocider på en sikker måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.*

Navn	Mengde	Antall i eske	Art. Nr.
Plastflaske	1 L	12 stk/krt	17220001



#### Produktegenskaper

- pH: ca. 8,0
- Med tensid
- IPA og etanolbasert
- Rustbeskyttelse

**Produksjonsland:** Sverige